


お客様各位

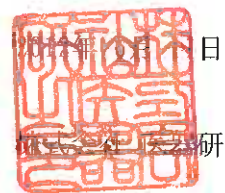

計画停電等に備えた事前の対応についてのお願い

拝啓 初夏の候、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、今夏においても電力需給のひっ迫が見込まれており、厚生労働省より「夏期の節電の取組の進め方について」の事務連絡がなされております。お客様におかれましては、医療機関と十分に連携し、適宜下記を取組を実施頂きたくご連絡申し上げます。何卒ご理解賜り、ご了解下さいますよう、お願い申し上げます。

敬具

#### 記

#### 1. ご使用いただいている酸素濃縮器の停電時の動作の周知・確認・点検

① 使用している機器の内蔵バッテリーの有無とバッテリー動作時間の周知

② 機種毎に用意されている、保守点検マニュアルに基づいた動作点検

・バッテリー付機種

(02 グリーン小春3、3SP、小春2+外部バッテリー、いぶき5SP、コンフォライフSL-3)

停電時のバッテリー運転への切替機能の作動の点検

・その他の機種(02 グリーン5、いぶき5、静音、コンフォライフIKシリーズ等)

停電警報の作動の確認。

停電警報は装置内部の電池で作動するため定期的に点検が必要です。

③ バッテリー付の機種においては充電の徹底

小春は、専用充電器を接続してバッテリーの残量ランプが消えるまで充電を実施。

小春3、いぶき5SP、コンフォライフSL-3は、充電ランプが消灯するまでコンセントを抜かない。

#### 2. バックアップ用ポンペの配送状況及び使用手順の再確認

患者様に必要なポンペが配布されているかの確認。

ポンペを使用した酸素吸入の手順が理解されているかを確認。

#### 3. 患者さまの状態に適した機器が設置されているかの確認と代替機器への交換

#### 4. 在宅患者さまとの緊急連絡体制の再確認

以上